

起動のしかた

1. 診断画像ディスクをコンピュータのディスクドライブにセットする。

診断画像ディスクの操作画面が表示されます。



自動表示されない場合は、「マイコンピュータ」→「CDドライブ」→「VIEWER」→「AFC.exe」から開いてください


専用ビューワで見る

をクリックする。

2. リストから目的の検査をクリックして選択し、「表示」ボタン

表示

をクリックする

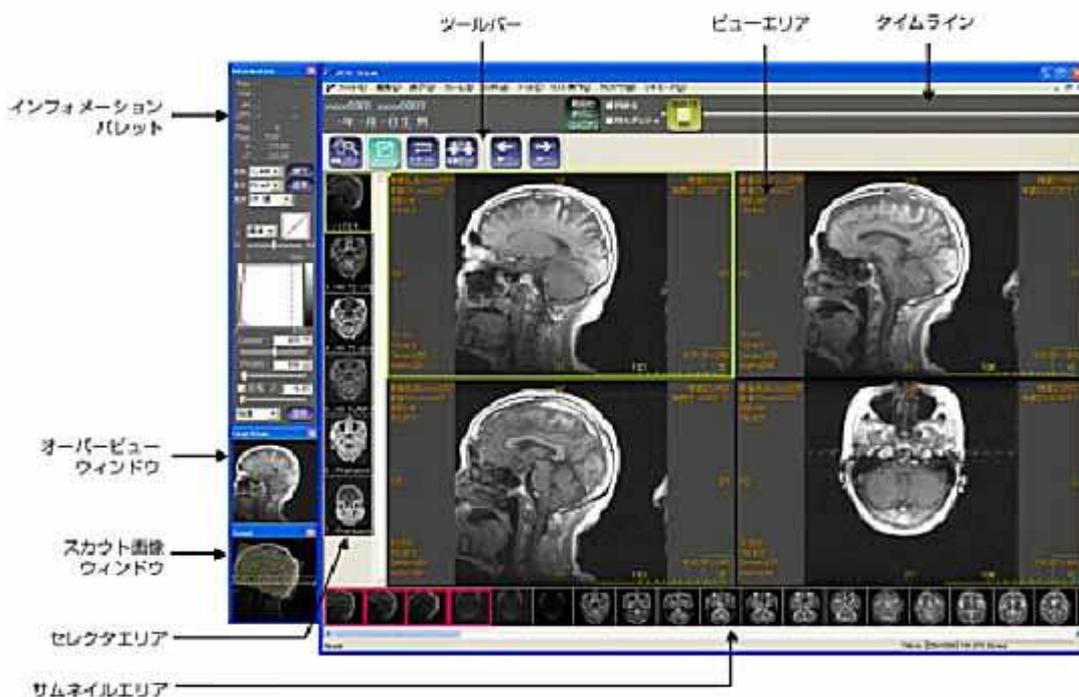

画像のみかた



1.「トーン」ボタンを使って明るさ・コントラストを変更する

「トーン」ボタンをクリックし、画像上でマウスをドラッグすることにより、トーンの変更を行うことができます。

明るさ(Center値)を変更する

左ボタンを押した状態で、マウスを左右に移動します。

コントラスト(Width値)を変更する

左ボタンを押した状態で、マウスを上下に移動します。

2.ツールバーを使って拡大／縮小する(「移動・ズーム」ボタン)

ツールバーの「移動・ズーム」ボタンをクリックする。

マウスをドラッグして、画像を拡大／縮小する。

拡大

マウスの左ボタンを押し続けたまま、上方向に移動しマウスの左ボタンを離す。


縮小

マウスの左ボタンを押し続けたまま、下方向に移動しマウスの左ボタンを離す。




3. 画像分割表示を変更する

メニューバーの「フレーム」→「1X1」、「1X2」を選ぶと、大きく表示されます。通常は「2X2」です。

CD-ROM内の他モダリティ、他の日付にジャンプできます。

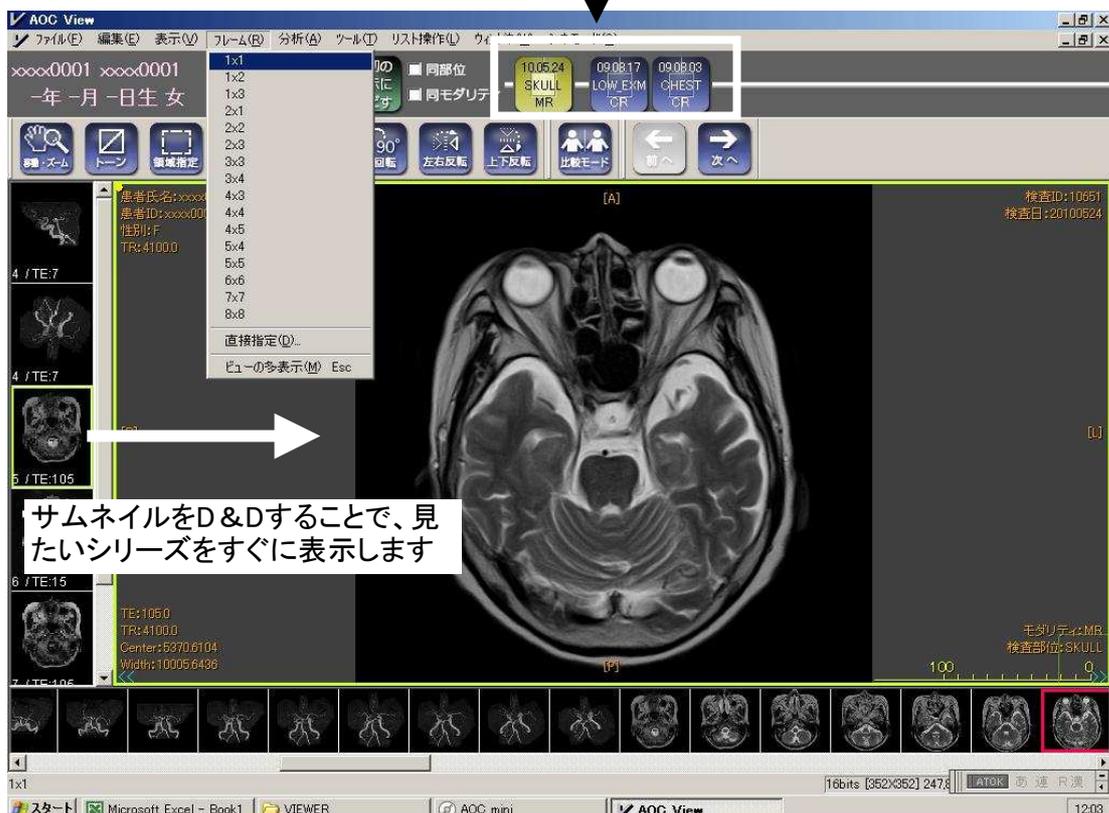




4. 距離の計測

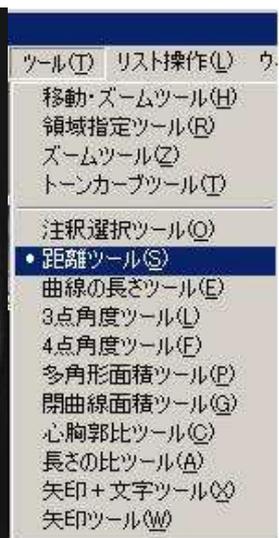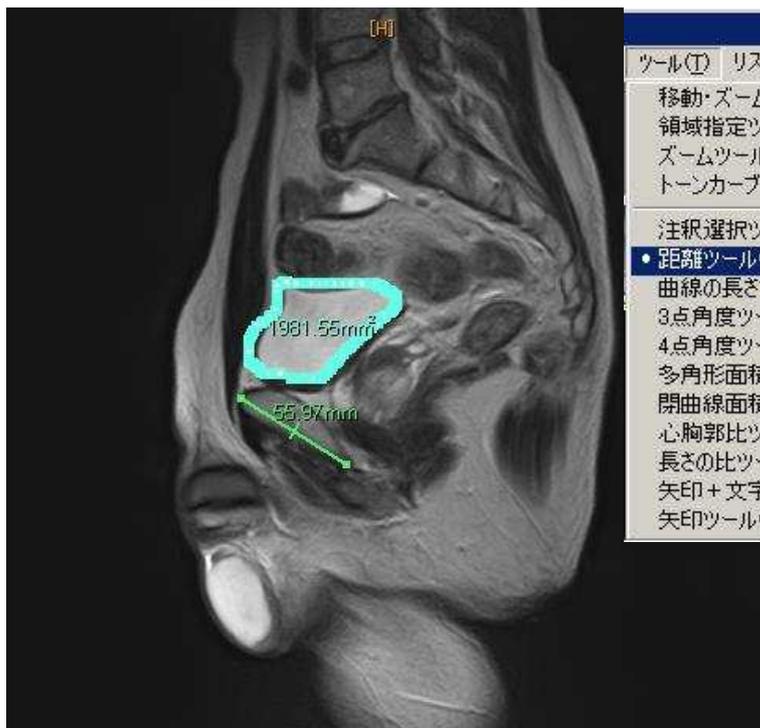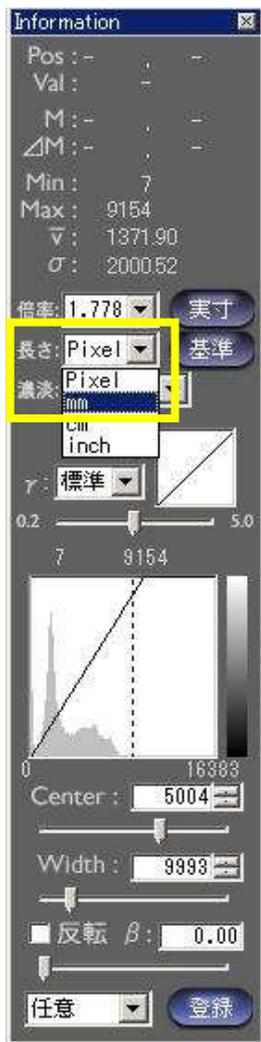

長さの単位をピクセルからmmに変更します。ツール⇒距離ツールから計測したい始点・終点をクリックして決めます。

同様に、閉曲線面積ツールで関心領域をドラックして囲むと面積を求めることができます。

5. ファイル出力

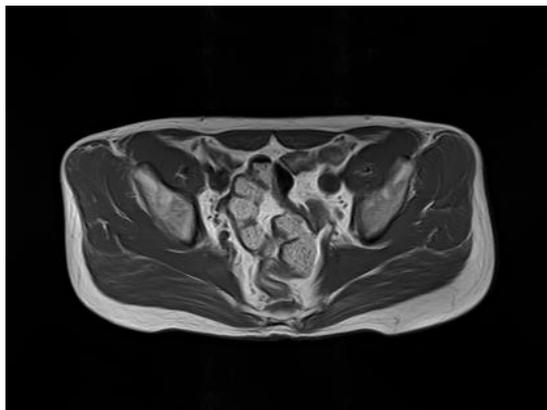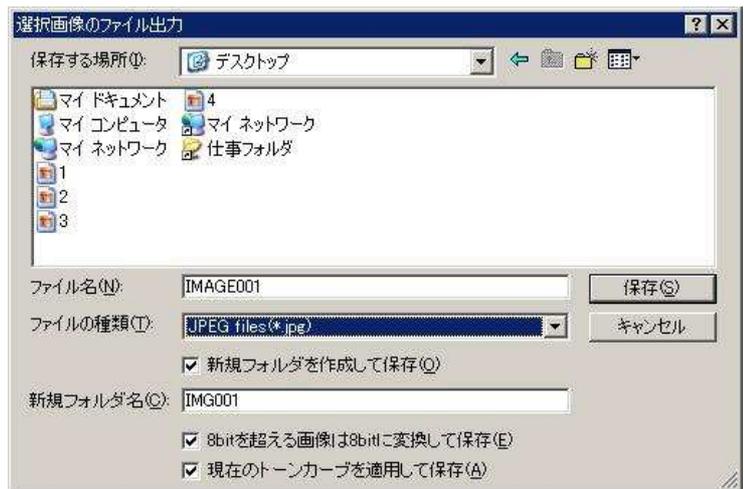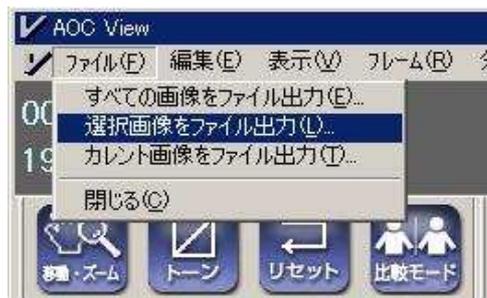

シリーズ全てまたは表示中の画像を匿名でjpgやbmp出力できます
お持ちのPCでの症例保存等にご利用ください。

※こちらに掲載されている全ての内容の無許可転用、無許可転載を禁止します。